

RESPIREZ MIEUX, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de Breathe Right® Bandelettes Nasales. Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

**Breathe
Right®**
BANDELETTES NAsALES

1 Qu'est-ce-que Breathe Right Bandelettes Nasales et dans quels cas l'utiliser ?

Breathe Right Bandelettes Nasales sont des bandelettes élastiques flexibles qui dégagent les voies nasales par soulèvement afin d'améliorer le passage de l'air. Il est cliniquement prouvé que **Breathe Right Bandelettes Nasales** ouvre instantanément les voies nasales afin de mieux respirer.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut être utilisé de jour ou de nuit pour soulager la congestion due aux allergies ou aux rhumes.

A utiliser si vous souffrez de :

• Congestion nasale

Breathe Right Bandelettes Nasales dégage le nez pour aider à mieux respirer en soulageant temporairement la congestion nasale qui peut être causée par les rhumes et allergies.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut procurer un soulagement temporaire des symptômes de congestion ou de respiration difficile dus à une déviation de la cloison nasale. Ce produit ne doit pas être considéré comme une alternative à la correction chirurgicale définitive.

• Ronflement

En facilitant la respiration à travers le nez au lieu de la bouche, **Breathe Right Bandelettes Nasales** peut aider à réduire ou même supprimer le ronflement. Pour de meilleurs résultats dans le soulagement du ronflement, il est recommandé de l'utiliser la nuit.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut être utilisé avec d'autres médicaments.

2 Comment utiliser Breathe Right Bandelettes Nasales ?

Jetable – N'utiliser chaque bandelette qu'une seule fois. Pour usage unique seulement.

Peut être utilisé de jour comme de nuit.

Un positionnement correct de la bandelette permet d'être sûr d'obtenir des performances optimales. Attention à ne pas placer le produit trop haut ou trop bas.

Il est nécessaire d'utiliser la taille de bandelette adéquate pour un meilleur résultat. Les bandelettes nasales de petite / moyenne taille conviennent à 75 % des nez, les bandelettes de grande taille conviennent aux adultes ayant un nez plus large.

Utiliser **Breathe Right Bandelettes Nasales** sensitive pour les peaux sèches / sensibles.

1



NETTOYER
Laver et sécher la peau du nez afin d'enlever les impuretés et le sébum (pour les peaux grasses, utiliser une lotion astringente).

2



POSITIONNER
Enlever la doublure protectrice et placer la bandelette sur le nez.

3



APPLIQUER
Appuyer aux deux extrémités avec vos doigts et frotter délicatement pour bien fixer.

4

ENLEVER
Enlevez votre **Breathe Right Bandelettes Nasales** lorsque vous nettoyez votre visage avec de l'eau chaude ou lorsque vous êtes sous la douche. Retirez toujours la bandelette lentement. Détendre les extrémités puis retirer doucement la bandelette de chaque côté afin de réduire le risque de réactions cutanées.

LES BREATHE RIGHT BANDELETTES NAsALES MENTHOL

Les **Breathe Right Bandelettes Nasales** mentholées sont revêtues de capsules contenant du menthol, de l'eucalyptus et du camphre. Gratter la surface afin de libérer les vapeurs de menthol – gratter à nouveau pour les réactiver.

RESPIREZ MIEUX, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

**Breathe
Right®**
BANDELETTES NASALES

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de Breathe Right® Bandelettes Nasales. Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

3 Pour votre sécurité

Mises en garde et précautions

- Pour usage externe uniquement.
- Ne pas placer sur les lésions cutanées, les coups de soleil ou les irritations.
- Si une éruption ou une irritation cutanée se produit, cesser l'utilisation.
- Ne pas utiliser plus de 12 heures par jour.
- Pour un meilleur résultat, les bandelettes nasales sont à usage unique seulement. Après retrait, la bandelette perd son côté adhésif et ne restera pas en place.
- **Tenir hors de la vue et la portée des enfants.**
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 5 ans.
- Les sachets en papier où les bandelettes nasales sont conditionnées peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

NE PAS UTILISER

Si vous êtes allergique au latex ou aux **Breathe Right Bandelettes Nasales**.

Apnée du sommeil : **Breathe Right Bandelettes Nasales** n'est pas destiné à traiter l'apnée du sommeil. Il est recommandé aux personnes présentant une apnée du sommeil de consulter un médecin.

Certaines personnes peuvent présenter des effets indésirables lors de l'utilisation de **Breathe Right Bandelettes Nasales**. Cela peut être des réactions au site d'application (exemple : érythème, irritation, douleur, exfoliation, excoriation) et des réactions d'hypersensibilité pouvant inclure des éruptions cutanées, prurit et œdème facial.

Tout incident sérieux survenant à l'occasion de l'utilisation de ce produit doit être communiqué au fabricant ainsi qu'à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM). Il est important de communiquer tout incident lié à ce produit car cela permet d'identifier des défauts de ce dispositif médical et permet de prévenir la survenue d'incidents similaires à nouveau.

4 Comment conserver Breathe Right Bandelettes Nasales

 Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
A conserver dans son étui d'origine.

Veillez éliminer le produit conformément à vos exigences locales et toujours tenir compte de l'environnement.

Ne pas utiliser après la date limite indiquée.

5 Autres informations

Breathe Right Bandelettes Nasales sont conditionnées dans une boîte avec des emballages individuels et scellés avec un adhésif.

Breathe Right Bandelettes Nasales au menthol sont recouvertes de capsules contenant du menthol, de l'eucalyptus et du camphre.

 Attention : avant d'utiliser ce produit, lire attentivement la notice contenue dans cet étui.

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

 Usage unique : les bandelettes nasales sont à usage unique.

 Les sachets en papier autour des bandelettes nasales peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel.

 Numéro de lot : voir étui.

 Date limite au format AAAA-MM

 Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.

 Brandshapers Ltd., Ardcanan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Irlande.

Distributeur : COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS
470 Av. de Lossburg, 69480 Anse, France.

www.breatheright.com



 Dispositif médical
Date : Novembre 2024

Marques de commerce détenues par FCB. © 2024 FCB.

111324
31056100